



Οδηγίες χρήσης – Ανοχος Αποστειρωμένα φιαλίδια πληρωμένα με άζωτο
Έκδοση 2 Ημερομηνία έκδοσης 04 Φεβρουαρίου 2025

Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πληροφορίες βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση αποστειρωμένων φιαλιδίων πληρωμένων με άζωτο για να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την απόδοση του προϊόντος και να διατηρεί την ακεραιότητα της εσωτερικής στεριότητας.

Ενδεδειγμένη χρήση και χρήστες:

Η προσωρινή αποθήκευση υλικών παραγόμενων από τον πελάτη για παρεντερική χορήγηση, προς χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.


Βασικό UDI-DI: 50566720VNSYK

Μέτρα ασφαλείας:

- Αυτό το προϊόν είναι αποστειρωμένο εσωτερικά, χρησιμοποιείτε κάθε φορά μια άσηπτη τεχνική για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φιαλίδιο και μην:
- Το χρησιμοποιείτε εάν ο στείρος φραγμός (πώμα και σφράγιση) φαίνεται να έχουν αλλοιωθεί ή έχουν αφαιρεθεί.
- Επαναχρησιμοποιείτε βελόνες ή σύριγγες για την πλήρωση και την κένωση του φιαλιδίου.
- Αφήνετε βελόνες ή σύριγγες στα φιαλίδια για μετέπειτα λήψη των φαρμάκων.
- Το χρησιμοποιείτε εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης

Οδηγίες χρήσης

1. Συγκεντρώστε όλα τα απαιτούμενα υλικά (πανάκι εμποτισμένο με αλκοόλη, βελόνα ή σύριγγα και τη συσκευή).
2. Αφαιρέστε το κουμπί Flip-Off® από τη σφράγιση αλουμινίου.

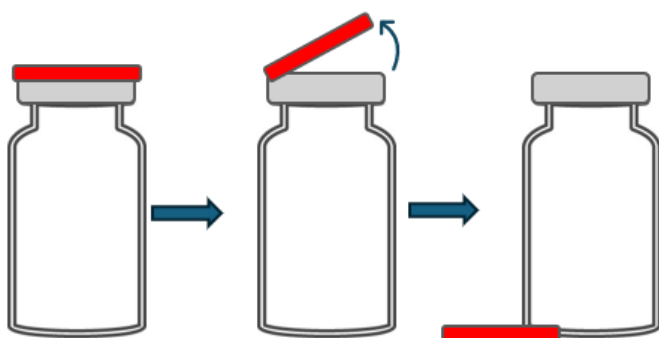

3. Απολυμάνετε το σημείο έγχυσης του φιαλιδίου με ένα πανάκι εμποτισμένο με αλκοόλη. Προσέξτε να μην αγγίξετε το πώμα μετά την απολύμανση.




ADELPHI
HEALTHCARE PACKAGING

ADELPHI HEALTHCARE PACKAGING

Olympus House, Mill Green Road
Haywards Heath, RH16 1XQ
United Kingdom

T +44 (0)1444 472300
F +44 (0)1444 472329
E sales@adelphi-hp.com
www.adelphi-hp.com

4. Διατρυπήστε το πώμα με μια βελόνα και πληρώστε με το προϊόν (εισαγάγετε τη βελόνα εντός του κύκλου στο μέσον του πώματος όπως υποδεικνύεται κάθετα προς το φιαλίδιο) συνιστάται οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι τελικοί χρήστες να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές όπως η διάτρηση κάθετα προς την επιφάνεια του πώματος και εντός του δακτυλίου-στόχου για να αποφευχθεί το χτύπημα των πόδων του πώματος, διάτρηση σε κατάλληλες ταχύτητες και περιορισμός επαναχρησιμοποίησης των βελονών για να μειωθεί ο κίνδυνος θραύσης και κατακερματισμού του πώματος.

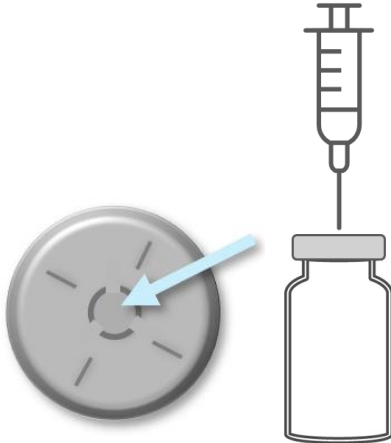

5. Αποθηκεύστε το φιαλίδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προϊόντος σας μέχρι να απαιτηθεί το περιεχόμενο.
6. Για να λάβετε το προϊόν, απολυμάνετε το σημείο έγχυσης του φιαλιδίου με ένα πανάκι εμποτισμένο με αλκοόλη και διατρυπήστε το πώμα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αναρροφήστε το προϊόν όπως απαιτείται σύμφωνα με τη δόση και τις διαδικασίες σας.
7. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια και τις βελόνες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Προσοχή

Το προϊόν είναι μίας χρήσης δεν συνιστάται η επανεπεξεργασία του προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο. Η επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει μόλυνση λόγω απώλειας της στειρότητας.

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.



MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands



Advena Medical Ltd, Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swatar, Malta

STERILE A

Adelphi Healthcare Packaging is the trading name of Adelphi (Tubes) Ltd. Registered in England. Company No. 985399
Registered Office: Olympus House, Mill Green Road, Haywards Heath, West Sussex RH16 1XQ

Τεχνικό αρχείο Adelphi Healthcare Packaging – Πληροφορίες για χρήση